



คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษา

หุ่น : หุ่นสาธิตการฝึกเจาะถุงน้ำคร่ำ

การใช้

นำถาดมารองตัวหุ่น (เพื่อรองรับน้ำที่รั่วไหล)

เลื่อนกลอนเพื่อถอดกล่องออกจากภายในตัวหุ่น


นำถุงยางอนามัย(หรือถุงชนิดอื่น) ใส่ลงไปในกลุ่มให้อยู่บริเวณปลายสุดของพื้นเอียง

นำตัวล๊อคถุงน้ำวางในกลุ่มเพื่อล๊อคตัวถุงที่ใส่น้ำ

นำกล่องวางภายในตัวหุ่นและลงกลอนเพื่อล๊อคตัวกล่อง



รูปที่ 1

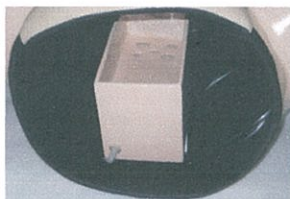

รูปที่ 2



รูปที่ 3

ดูแลรักษา

ก่อนการใช้งาน

- 1.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
- 1.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
- 1.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
- 1.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น (ยกเว้นบริเวณบริเวณที่เป็นพลาสติก)

หลังการใช้งาน

- 2.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
- 2.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
- 2.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
- 2.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น (ยกเว้นบริเวณบริเวณที่เป็นพลาสติก)
- 2.5 เก็บใส่ภาชนะบรรจุและปิดผนึกให้แน่น

ข้อควรระวัง

- 3.1 ควรหลีกเลี่ยงวัตถุ สิ่งของที่มีความแหลมหรือคมสัมผัสกับตัวหุ่น เพื่อป้องกันการฉีกขาด
- 3.2 ควรหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหรือเปื้อนของหมึกของปากกาชนิดต่างๆ เพราะจะไม่สามารถทำความสะอาดได้
- 3.3 ห้ามวางวัตถุอื่นกดทับตัวหุ่น เพื่อป้องกันการชำรุดและเสื่อมสภาพ
- 3.4 ควรหลีกเลี่ยงการร่วงหล่นจากที่สูงของหุ่น เพราะอาจทำให้หุ่นชำรุดเสียหายได้