



บริษัท ควอลิไต์ เทรดดิ้ง จำกัด
QUALIFIED TRADING CO., LTD.

เลขที่ 4 ซอย 16 หมู่บ้านเสรีหนึ่ง (ยังไม่ข้ามสะพาน)
ถนนรามคำแหง ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ กทม. 10250
ตู้ ปณ. 10-1083 ป.พ.ล. เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10311
โทร. 02-318-4793, 02-318-4651, 02-719-0842, 02-719-0848 แฟกซ์ 02-318-3270

Baby Stap
(375-34001 Baby Stap)

เป็นหุ่นทารกแรกเกิดที่เหมือนจริง ออกแบบมาพิเศษเพื่อการฝึกปฏิบัติเทคนิคการเจาะบริเวณใต้เนื้อ
สะโพกในทางวิชาชีพ

การประดิษฐ์หุ่นอย่างดีนี้จะสามารถใช้ในการฝึกได้เป็นปีหากมีการบำรุงรักษาและดูแลอย่าง
เหมาะสม

อุปกรณ์ประกอบด้วย:

- Baby Stap (1)
- สมุดรับประกัน Laerdal Global (1)
- คำแนะนำการใช้ (1)

การเตรียมการใช้หุ่นและการเปลี่ยนท่อไขสันหลัง

1. ผูกจุกที่ส่วนปลายของท่อยาง และใส่เข้าไปในช่องไขสันหลัง
2. ใส่กระดูกสันหลังเข้าไปในหุ่น
3. เติมน้ำในขวดน้ำ
4. ต่อขวดกับปลายท่อที่หลวมของหุ่น
5. ยกขวดน้ำขึ้นเหนือหุ่น
6. ใส่กระบอกฉีดยาเข้าไปในไขสันหลังและบีบอากาศที่เกินออกจากท่อ

หุ่นก็พร้อมสำหรับการเจาะบริเวณใต้เนื้อสะโพก

หมายเหตุ: หุ่นสามารถวางในท่าด้านข้างหรือนั่งได้



บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด
QUALIFIED TRADING CO., LTD.

เลขที่ 4 ซอย 16 หมู่บ้านเสรีหนึ่ง (ยังไม่ข้ามสะพาน)
ถนนรามคำแหง ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ กทม. 10250
ตู้ ปณ. 10-1083 ปตท. เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10311
โทร. 02-318-4793, 02-318-4651, 02-719-0842, 02-719-0848 แฟกซ์ 02-318-3270

การดูแลและการบำรุงรักษา

1. ทำความสะอาดด้วยน้ำกับสบู่อ่อน ๆ ห้ามจุ่มหุ่นหรือส่วนใดลงในสารทำความสะอาดหรือน้ำ
2. ใช้งานบนพื้นผิวที่สะอาด หลีกเลี่ยงปลายเครื่องหมายขีดข่วน หมึกปากกา อะซีไตน ไอโอดีน หรือผลิตภัณฑ์สีอื่น ๆ และหลีกเลี่ยงการวางหุ่นบนกระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์หรือหมึกต่าง ๆ ทุกชนิด
3. เพื่อให้แน่ใจว่าหุ่นจะมีอายุการใช้งานนาน ควรทำความสะอาดหลังจากการฝึกแล้วทุกครั้งและตรวจสอบสภาพทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ
4. ส่วนประกอบและส่วนต่าง ๆ ควรจะระบายและทำให้แห้งโดยตลอดก่อนเก็บ และฆ่าเชื้อเมื่อจำเป็น
5. ส่วนที่เป็นปลั๊กต่าง ๆ จะมีประโยชน์จากการทาแป้งบาง ๆ ก่อนการฝึก
6. เก็บอย่างเหมาะสมในระหว่างการฝึกปฏิบัติ

รายการอะไหล่

รหัสสินค้า	รายละเอียด
375-34001	Baby Stap
375-32350	Clear Wide Mouth Bottle (ขวดปากกว้างใส)
375-34150	Baby Stap Spine Tubing (ท่อไขสันหลัง Baby Stap)