




คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษา

ชื่อหุ่น : หุ่นสาธิตการฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่

วิธีการใช้ฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ

1. จัดวางหุ่นให้อยู่ในท่านอนหงาย
2. จัดวางให้ปอดและกระเพาะอาหารอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
3. ก่อนการใช้งานควรทาสารหล่อลื่นให้กับหุ่นบริเวณโพรงจมูก โพรงปาก คอหอย และหลอดอาหารส่วนต้น
4. เริ่มต้นการใช้งาน
5. หลังการใช้งานทุกครั้งให้กำจัดคราบของสารหล่อลื่นออกทุกครั้ง

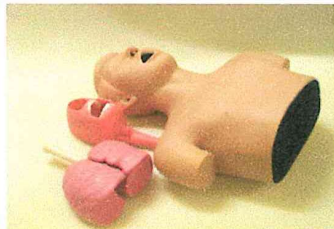

การดูแลรักษา

1. ก่อนการใช้งาน
 - 1.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 1.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดทั่วทุกบริเวณของหุ่น
 - 1.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 1.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
2. หลังการใช้งาน
 - 2.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 2.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดทั่วทุกบริเวณของหุ่น
 - 2.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 2.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
 - 2.5 เก็บใส่ภาชนะบรรจุและปิดผนึกให้แน่น
3. ข้อควรระวัง
 - 3.1 ควรหลีกเลี่ยงวัตถุ สิ่งของที่มีความแหลมหรือคมสัมผัสกับตัวหุ่น เพื่อป้องกันการฉีกขาด
 - 3.2 ควรหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหรือเปื้อนของหมึกของปากกาชนิดต่างๆ เพราะจะไม่สามารถทำความสะอาดได้
 - 3.3 ห้ามวางวัตถุอื่นกดทับตัวหุ่น เพื่อป้องกันการชำรุดและเสื่อมสภาพ
 - 3.4 ควรหลีกเลี่ยงการร่วงหล่นจากที่สูงของหุ่น เพราะอาจทำให้หุ่นชำรุดเสียหายได้