





คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษา

ชื่อหุ่น : หุ่นสาธิตการฝึกสกรน้ำและยาทางไขกระดูก

วิธีการใช้

1. จัดวางหุ่นในท่าและตำแหน่งที่ต้องการฝึก
2. นำซองชาแต่ละข้างสวมให้กับตัวหุ่น
2. ติดตั้งระบบสกรน้ำและระบายน้ำเข้ากับตัวหุ่น โดยตรวจสอบความถูกต้องสายยาง
3. ให้ปลายสายยางเส้นใหญ่ต่อจากกล่องน้ำ และให้ปลายสายยางเส้นเล็กแขวนที่ช่องของกล่องน้ำ (เกือบถึงลูกยาง) โดยควบคุมการไหลโดยวาล์วของลูกยาง แล้วจึงปิดวาล์วของภาชนะใส่ของเหลว
4. หลังการใช้งานทุกครั้งต้องระบายของเหลวออกจากเส้นเลือดภายในหุ่นและภาชนะบรรจุออกให้หมด

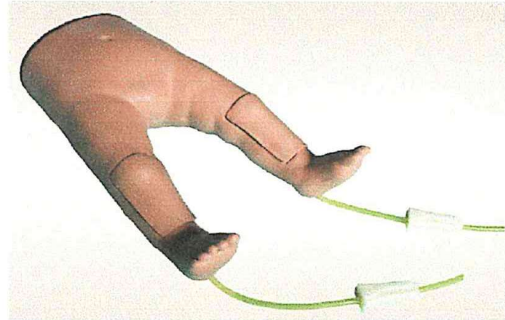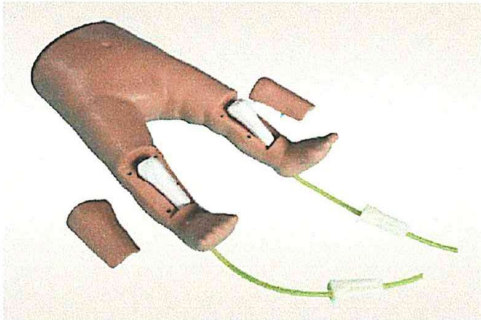

การดูแลรักษา

1. ก่อนการใช้งาน
 - 1.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 1.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
 - 1.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 1.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น (เฉพาะบริเวณที่เป็นยาง)
2. หลังการใช้งาน
 - 2.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 2.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
 - 2.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 2.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น (เฉพาะบริเวณที่เป็นยาง)
 - 2.5 เก็บใส่ภาชนะบรรจุและปิดฝักให้แน่น
3. ข้อควรระวัง
 - 3.1 ควรหลีกเลี่ยงวัตถุ สิ่งของที่มีความแหลมหรือคมสัมผัสกับตัวหุ่น เพื่อป้องกันการฉีกขาด
 - 3.2 ควรหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหรือเปื้อนของหมึกของปากกาชนิดต่างๆ เพราะจะไม่สามารถเช็ดทำความสะอาดได้
 - 3.3 ห้ามวางวัตถุหนักกดทับตัวหุ่น เพื่อป้องกันการชำรุดและเสื่อมสภาพ
 - 3.4 ควรหลีกเลี่ยงการร่วงหล่นจากที่สูงของหุ่น เพราะอาจทำให้หุ่นชำรุดเสียหายได้