




คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษา


ชื่อหุ่น : OT007 หุ่นฝึกการทำ Closed Reduction ของ Shoulder Dislocation

วิธีการใช้


1. นำหุ่นวางลงในตำแหน่งและท่าที่เหมาะสมกับการฝึก
2. การสร้างสภาวะไหล่หลุด ทำโดยการบิดแขนและดันไหล่ไปทางด้านหน้าของหุ่น จนกระทั่งหลุดออกจากข้อไหล่ โดยสังเกตจากท่าทางที่ผิดปกติบริเวณแขนท่อนบน
3. เริ่มต้นการฝึกดึงไหล่หลุดให้เข้าที่
4. หลังการใช้งานต้องดึงไหล่ให้อยู่ในสภาวะปกติทุกครั้ง ก่อนเก็บเพื่อยืดอายุการใช้งานของหุ่น

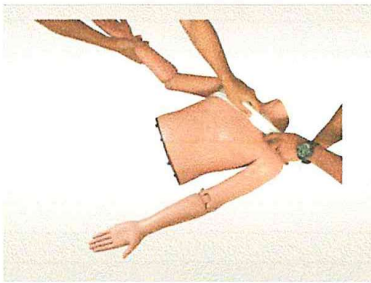

รูปที่ 1

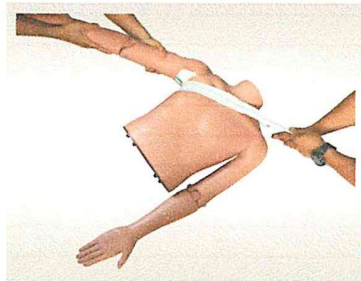

รูปที่ 2

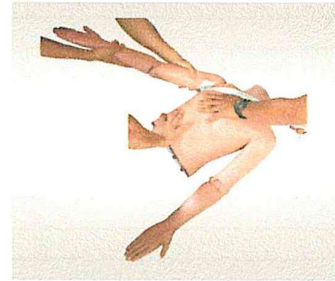

รูปที่ 3

การดูแลรักษา

1. ก่อนการใช้งาน
 - 1.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 1.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
 - 1.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 1.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
2. หลังการใช้งาน
 - 2.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 2.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
 - 2.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 2.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
 - 2.5 เก็บใส่ภาชนะบรรจุและปิดผนึกให้แน่น
3. ข้อควรระวัง
 - 3.1 ควรหลีกเลี่ยงวัตถุ สิ่งของที่มีความแหลมหรือคมสัมผัสกับตัวหุ่น เพื่อป้องกันการฝึกขาด
 - 3.2 ควรหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหรือเปื้อนของหมึกของปากกาชนิดต่างๆ เพราะจะไม่สามารถเช็ดทำความสะอาดได้
 - 3.3 ห้ามวางวัตถุอื่นกดทับตัวหุ่น เพื่อป้องกันชำรุดและเสื่อมสภาพ
 - 3.4 ควรหลีกเลี่ยงการร่วงหล่นจากที่สูงของหุ่น เพราะอาจทำให้หุ่นชำรุดเสียหายได้