

คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษา

ชื่อรุ่น : OG009 รุ่นสาธิตการฝึกตรวจภายใน (Verginal Palpation Model)

วิธีการใช้

1. นำมดลูกชนิดต่างๆ ที่ต้องการฝึกหัดถถการ ใส่ลงในตัวหุ่นให้ตรงตำแหน่ง
 - 2.1 มดลูก ที่มีปากมดลูกปกติ + มดลูกปกติ
 - 2.2 มดลูก ที่มีปากมดลูก(มีพยาธิสภาพ) + มดลูกปกติ
 - 2.3 มดลูก ที่มีปากมดลูกปกติ + มดลูกปกติที่มีรังไข่โตผิดปกติ
 - 2.4 มดลูก ที่มีปากมดลูกมี Polyp + มดลูกปกติ
 - 2.5 มดลูก ที่มีปากมดลูกปกติ + มดลูกที่มีก้อน Mass ขนาด 5 ซม.
 - 2.6 มดลูกอายุครรภ์ 8 - 10 สัปดาห์
 - 2.7 มดลูกสำหรับฝึกใส่ห่วง
 - 2.8 มดลูกฝึกการทำ Biopsy / Polypectomy (เปลี่ยนปากมดลูกได้)
2. เริ่มต้นการใช้งาน



รูปที่1



รูปที่2



รูปที่3

ภาพแสดงมดลูกชนิดต่างๆ



2.1



2.2



2.3



2.4



2.5



2.6



2.7



2.8

การดูแลรักษา

1. ก่อนการใช้งาน
 - 1.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 1.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดทั่วทุกบริเวณของหุ่น
 - 1.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 1.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
2. หลังการใช้งาน
 - 2.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 2.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดทั่วทุกบริเวณของหุ่น
 - 2.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 2.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
 - 2.5 เก็บใส่ภาชนะบรรจุและปิดผนึกให้แน่น
3. ข้อควรระวัง
 - 3.1 ควรหลีกเลี่ยงวัตถุ สิ่งของที่มีความแหลมหรือคมสัมผัสกับตัวหุ่น เพื่อป้องกันการฉีกขาด
 - 3.2 ควรหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหรือเปื้อนของหมึกของปากกาชนิดต่างๆ เพราะจะไม่สามารถเช็ดทำความสะอาดได้
 - 3.3 ห้ามวางวัตถุอื่นกดทับตัวหุ่น เพื่อป้องกันชำรุดและเสื่อมสภาพ
 - 3.4 ควรหลีกเลี่ยงการร่วงหล่นจากที่สูงของหุ่น เพราะอาจทำให้หุ่นชำรุดเสียหายได้