



คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษา


ชื่อหุ่น : OG006 หุ่นสาธิตการฝึกตรวจ Dilatation/Effacement Dilation

วิธีการใช้


1. นำตัวหุ่นวางในตำแหน่งที่ต้องการฝึก
2. ทาสารหล่อลื่นที่ชุด Perineum และบริเวณตัวหุ่นตรงตำแหน่งที่จะติดตั้ง ให้ทั่ว
3. นำชุด Perineum ระยะเวลาที่ต้องการฝึก ติดตั้งลงบนตัวหุ่น

<u>ชั้นที่</u>	<u>Dilatation (ซ.ม)</u>	<u>Effacement(%)</u>
1	1.5	0
2	3	25%
3	5	50%
4	6	75%
5	7.5	85%
6	9.5	100%


4. การวางชุด Perineum ลงในตัวหุ่นต้องให้ ชุด Perineum ตั้งบนแท่นภายในตัวหุ่น และแผ่นอวัยวะเพศหญิงภายนอก แนบสนิทกับตัวหุ่น (รูปที่ 2)
5. ชุด Perineum ระยะเวลาที่ 3-6 สามารถหมุนปรับระดับศีรษะทารก เพื่อการคลำหา Sugere ในลักษณะต่างๆ (คว่ำ, ตะแคง, หงาย)
6. หลังการใช้งานทุกครั้ง ให้ถอดชุดปากมดลูกออกแยกจากตัวหุ่น

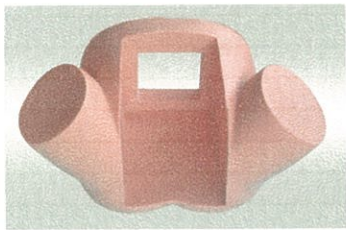

รูปที่ 1

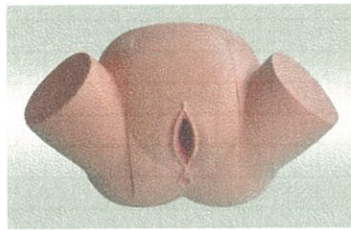

รูปที่ 2

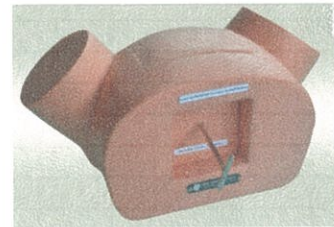

รูปที่ 3

การดูแลรักษา

1. ก่อนการใช้งาน
 - 1.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 1.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดทั่วทุกบริเวณของหุ่น
 - 1.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 1.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
2. หลังการใช้งาน
 - 2.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 2.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดทั่วทุกบริเวณของหุ่น
 - 2.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 2.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
 - 2.5 เก็บใส่ภาชนะบรรจุและปิดผนึกให้แน่น
3. ข้อควรระวัง
 - 3.1 ควรหลีกเลี่ยงวัตถุ สิ่งของที่มีความแหลมหรือคมสัมผัสกับตัวหุ่น เพื่อป้องกันการฉีกขาด
 - 3.2 ควรหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหรือเปื้อนของหมึกของปากกาชนิดต่างๆ เพราะจะไม่สามารถเช็ดทำความสะอาดได้
 - 3.3 ห้ามวางวัตถุอื่นกดทับตัวหุ่น เพื่อป้องกันชำรุดและเสื่อมสภาพ
 - 3.4 ควรหลีกเลี่ยงการร่วงหล่นจากที่สูงของหุ่น เพราะอาจทำให้หุ่นชำรุดเสียหายได้