


## คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษา


ชื่อหุ่น : หุ่นฝึกการใส่สายระบายทรวงอก (แบบ 2 ข้าง)

### วิธีการใช้


1. จัดวางหุ่นให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมกับการฝึกหัตถการ
2. ติดตั้งแผ่นกล้ามเนื้อจำลอง (Intercostal Muscle) บนชุดโครงกระดูกและปอด ให้ตรงตามตำแหน่ง (รูปที่2)
3. ติดตั้งแผ่นผิวหนังลงบนตัวหุ่น (รูปที่3)
4. เริ่มต้นการฝึกหัตถการ

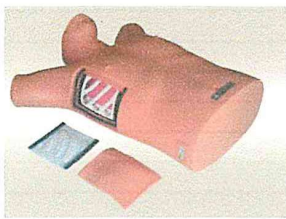

รูปที่1

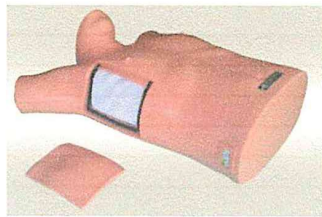

รูปที่2

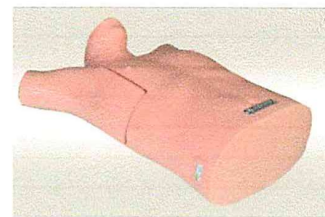

รูปที่3

### การดูแลรักษา

1. ก่อนการใช้งาน
  - 1.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
  - 1.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
  - 1.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
  - 1.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
2. หลังการใช้งาน
  - 2.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
  - 2.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
  - 2.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
  - 2.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
  - 2.5 เก็บใส่ภาชนะบรรจุและปิดฝนิ้กให้แน่น
3. ข้อควรระวัง
  - 3.1 ควรหลีกเลี่ยงวัตถุ สิ่งของที่มีความแหลมหรือคมสัมผัสกับตัวหุ่น เพื่อป้องกันการฉีกขาด
  - 3.2 ควรหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหรือเปื้อนของหมึกของปากกาชนิดต่างๆ เพราะจะไม่สามารถเช็ดทำความสะอาดได้
  - 3.3 ห้ามวางวัตถุอื่นกดทับตัวหุ่น เพื่อป้องกันการชำรุดและเสื่อมสภาพ
  - 3.4 ควรหลีกเลี่ยงการร่วงหล่นจากที่สูงของหุ่น เพราะอาจทำให้หุ่นชำรุดเสียหายได้