


คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษา


ชื่อรุ่น : M008 รุ่นฝึกการเจาะน้ำไขสันหลัง

วิธีการใช้

1. นำแผ่นผิวหนังแผ่นหลังวางในตัวหุ่น โดยทาสารหล่อลื่นที่แผ่นผิวหนังทุกครั้ง
2. เชื่อมต่อระบบน้ำเข้ากับตัวหุ่น (รูปที่ 3)
3. เติมน้ำในระบบน้ำ
4. เปิดระบบน้ำให้น้ำไหลเข้าสู่ไขกระดูกจำลอง โดยยกปลายสายยางที่ออกจากตัวหุ่นให้สูงกว่าตัวหุ่น
5. เริ่มต้นใช้งาน
6. หลังการใช้งานให้ระบายน้ำออกจากไขกระดูกและระบบน้ำทุกครั้ง

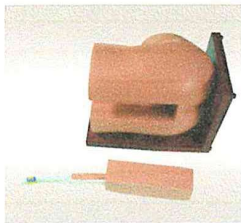

รูปที่ 1

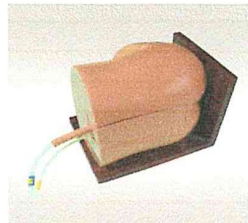

รูปที่ 2



รูปที่ 3

การดูแลรักษา

1. ก่อนการใช้งาน
 - 1.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 1.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
 - 1.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 1.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น (เฉพาะบริเวณที่เป็นยาง)
2. หลังการใช้งาน
 - 2.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 2.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
 - 2.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 2.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น (เฉพาะบริเวณที่เป็นยาง)
 - 2.5 เก็บใส่ภาชนะบรรจุและปิดผนึกให้แน่น
3. ข้อควรระวัง
 - 3.1 ควรหลีกเลี่ยงวัตถุ สิ่งของที่มีความแหลมหรือคมสัมผัสกับตัวหุ่น เพื่อป้องกันการฉีกขาด
 - 3.2 ควรหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหรือเปื้อนของหมึกของปากกาชนิดต่างๆ เพราะจะไม่สามารถเช็ดทำความสะอาดได้
 - 3.3 ห้ามวางวัตถุอื่นกดทับตัวหุ่น เพื่อป้องกันชำรุดและเสื่อมสภาพ
 - 3.4 ควรหลีกเลี่ยงการร่วงหล่นจากที่สูงของหุ่น เพราะอาจทำให้หุ่นชำรุดเสียหายได้