

## คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษา

ชื่อรุ่น : O007 รุ่นฝึกการตรวจจอบประสาทตา แบบจอLED (Ophthalmoscopy Training Model)


### วิธีการใช้

#### การเชื่อมต่อกับ Computer Notebook / PC

1. นำหุ่นวางบนพื้นที่ที่เหมาะสมกับการฝึก
2. เชื่อมต่อ Adapter (ที่เสียบปลั๊กไฟแล้ว) เข้ากับตัวหุ่น
3. เชื่อมต่อสายสัญญาณ HDMI ที่ตัวหุ่น เข้ากับ Computer Notebook / PC
4. เสียบ Flash Drive ที่มีโปรแกรมสำหรับฝึกตรวจจอบประสาทตา เข้ากับตัวหุ่น
5. ปรับโหมดหน้าจอในการแสดงผล ( Function F6 ซึ่งแต่ละอุปกรณ์อาจใช้ Function ต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้)
6. เปิดโปรแกรม
7. เริ่มต้นการใช้งาน

#### การเชื่อมต่อแบบไร้สาย Tablet, Smart Phone(Android), Ipad

1. นำหุ่นวางบนพื้นที่ที่เหมาะสมกับการฝึก
2. เชื่อมต่อตัวปล่อยสัญญาณ wifi (Any Cast ) เข้ากับตัวหุ่น และปลั๊ก USB (สังเกตหน้าจอจะแสดงผล)
3. ทำการเชื่อมต่อ ( wifi ) จากตัวหุ่น เข้ากับอุปกรณ์ ( Tablet, Smart Phone, Ipad ที่ทำการติดตั้งโปรแกรมสำหรับการฝึกแล้ว)  
โดยสามารถเชื่อมต่อได้ที่เครื่อง Password : 80161661 ( ซึ่งจะแสดงอยู่ขอบด้านบนของจอLED ภายในตัวหุ่น)
4. สามารถสังเกตขั้นตอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ได้จากขอบด้านบนของจอLED
5. เมื่อทำการเชื่อมต่อสัญญาณเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มปรับโหมดหน้าจอในการแสดงผล
6. เปิด File Program ที่ใช้ในการฝึกในอุปกรณ์
7. เริ่มต้นการใช้งาน

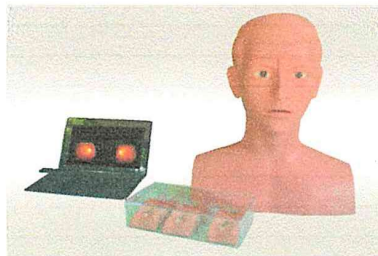

### การดูแลรักษา

#### 1. ก่อนการใช้งาน

- 1.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
- 1.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
- 1.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
- 1.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น

#### 2. หลังการใช้งาน

- 2.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
- 2.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
- 2.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
- 2.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
- 2.5 เก็บใส่ภาชนะบรรจุและปิดผนึกให้แน่น

#### 3. ข้อควรระวัง

- 3.1 ควรหลีกเลี่ยงวัตถุ สิ่งของที่มีความแหลมหรือคมสัมผัสกับตัวหุ่น เพื่อป้องกันการฉีกขาด
- 3.2 ควรหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหรือเปื้อนของหมึกของปากกาชนิดต่างๆ เพราะจะไม่สามารถเช็ดทำความสะอาดได้
- 3.3 ห้ามวางวัตถุอื่นกดทับตัวหุ่น เพื่อป้องกันชำรุดและเสื่อมสภาพ
- 3.4 ควรหลีกเลี่ยงการร่วงหล่นจากที่สูงของหุ่น เพราะอาจทำให้หุ่นชำรุดเสียหายได้
- 3.5 การใช้มือจับแผ่นสไลด์ มือที่จับต้องแห้งสะอาดไม่มีเหงื่อหรือน้ำ เพื่อยืดอายุการใช้งาน