


คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษา

ชื่อรุ่น : OG049 รุ่นฝึกการคลำหน้าท้องเพื่อตรวจครรภ์และฟังเสียงหัวใจทารก

วิธีการใช้

1. นำตัวหุ่นวางบนพื้นที่เหมาะสมกับการฝึก
2. จัดท่าทารกในครรภ์ให้อยู่ในลักษณะที่ต้องการฝึก
3. บีบลมเข้าสู่ตัวหุ่น ในปริมาณที่เหมาะสมกับการฝึก ล้อคลุกบีบ (เพื่อไม่ให้ลมออก)
4. เชื่อมต่อตัวหุ่นเข้ากับอุปกรณ์ควบคุมเสียงหัวใจทารก
 - ผู้ใช้สามารถจำลองเสียงการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ ซึ่งปรับได้ตามอายุครรภ์ (10-38 week)
5. เริ่มต้นการทำหัตถการ

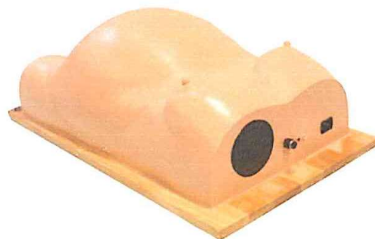

การดูแลรักษา

1. ก่อนการใช้งาน
 - 1.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 1.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
 - 1.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 1.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น (ยกเว้นบริเวณบริเวณที่เป็นพลาสติก)
2. หลังการใช้งาน
 - 2.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 2.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
 - 2.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 2.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น (ยกเว้นบริเวณบริเวณที่เป็นพลาสติก)
 - 2.5 เก็บใส่ภาชนะบรรจุและปิดผนึกให้แน่น
3. ข้อควรระวัง
 - 3.1 ควรหลีกเลี่ยงวัตถุ สิ่งของที่มีความแหลมหรือคมสัมผัสกับตัวหุ่น เพื่อป้องกันการฉีกขาด
 - 3.2 ควรหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหรือเปื้อนของหมึกของปากกาชนิดต่างๆ เพราะจะไม่สามารถเช็ดทำความสะอาดได้
 - 3.3 ห้ามวางวัตถุอื่นกดทับตัวหุ่น เพื่อป้องกันชำรุดและเสื่อมสภาพ
 - 3.4 ควรหลีกเลี่ยงการร่วงหล่นจากที่สูงของหุ่น เพราะอาจทำให้หุ่นชำรุดเสียหายได้