

## คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษา

ชื่อรุ่น : OG038 รุ่นฝึกปฏิบัติเย็บฝีเย็บ


### วิธีการใช้

#### ใช้สำหรับการฝึกเย็บและซ่อมแซมฝีเย็บ

1. นำก้อนฝีเย็บติดตั้งลงบนตัวหุ่น (รูปที่1)
2. ปรับตำแหน่งก้อนฝีเย็บให้ขอบตรงกับขอบของแผ่นอวัยวะเพศบนตัวหุ่น
3. สามารถปรับขนาดแผลได้ตามต้องการโดยดันตัวล็อคสำหรับปรับขนาดแผล (บริเวณด้านหลัง) รูปที่(2,3)
4. เริ่มต้นการใช้งาน



รูปที่ 1

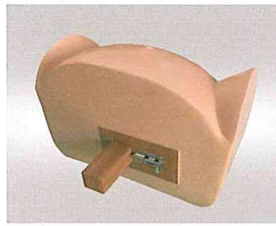

รูปที่ 2



รูปที่ 3

### การดูแลรักษา

#### 1. ก่อนการใช้งาน

- 1.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
- 1.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
- 1.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
- 1.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น(ยกเว้นบริเวณบริเวณที่เป็นพลาสติก)

#### 2. หลังการใช้งาน

- 2.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
- 2.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
- 2.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด(ยกเว้นบริเวณบริเวณที่เป็นพลาสติก)
- 2.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
- 2.5 เมื่อยังไม่ได้ใช้งานหรือใช้งานเสร็จแล้ว ควรเก็บใส่ภาชนะบรรจุที่ทางโรงงานให้ไว้เท่านั้น และปิดฝืนึกให้แน่น

#### 3. ข้อควรระวัง

- 3.1 ควรหลีกเลี่ยงวัตถุ สิ่งของที่มีความแหลมหรือคมสัมผัสกับตัวหุ่น เพื่อป้องกันการฉีกขาด
- 3.2 ควรหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหรือเปื้อนของหมึกของปากกาชนิดต่างๆ เพราะจะไม่สามารถเช็ดทำความสะอาดได้
- 3.3 ห้ามวางวัตถุอื่นกดทับตัวหุ่น เพื่อป้องกันการชำรุดและเสื่อมสภาพ
- 3.4 ก้อนฝีเย็บแต่ละก้อนไม่ควรวางซ้อนทับกัน เพราะอาจทำให้เกิดการชำรุด เสียหายได้
- 3.5 ควรหลีกเลี่ยงการร่วงหล่นจากที่สูงของหุ่น เพราะอาจทำให้หุ่นชำรุดเสียหายได้