


M43D

หุ่นฝึกเจาะตรวจน้ำไขกระดูกสันหลังเด็ก

คู่มือการใช้งาน



อุปกรณ์ในชุด

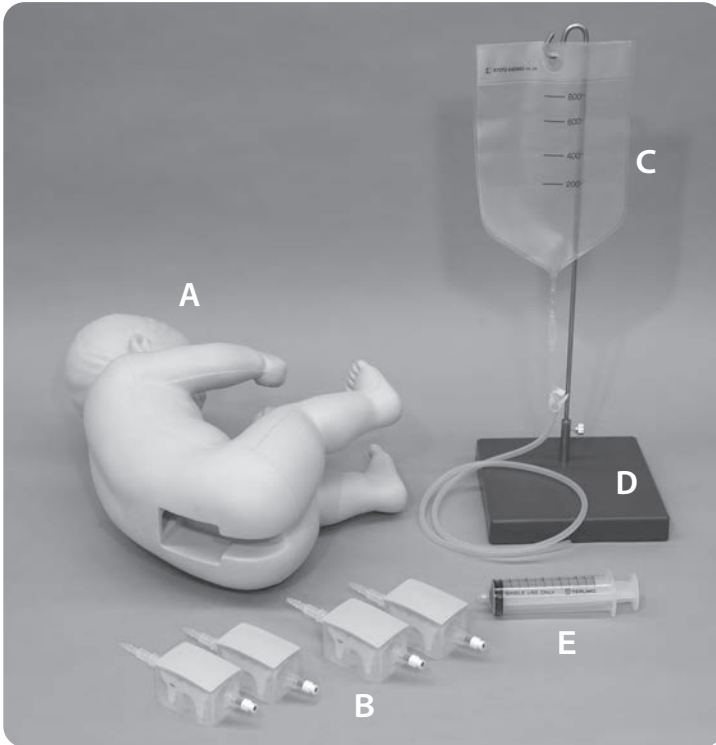

- | | | |
|---|--|---------------|
| A | หุ่นเด็กทารก (อายุ 7-10 เดือน) | 1 ชิ้น |
| B | บล็อกกระดุกไขสันหลัง
(2 ชนิด: ความลึก: 12 มิลลิเมตร • 17 มิลลิเมตร) | ชนิดละ 2 ชิ้น |
| C | ถุงใส่ของเหลว | 1 ชิ้น |
| D | ขาตั้ง | 1 ชิ้น |
| E | กระบอกฉีดยา (50มล.) | 1 ชิ้น |

วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ทดแทน

บล็อกกระดุกไขสันหลังขนาดความลึก 12 มิลลิเมตร
จำนวน 2 ชิ้น



11348-410

บล็อกกระดุกไขสันหลังขนาดความลึก 17 มิลลิเมตร
จำนวน 2 ชิ้น



11348-420

1 เตรียมขาตั้งและถุงใส่ของเหลว

1. ประกอบขาตั้ง




2. แขนงถุงใส่ของเหลวเข้ากับขาตั้ง




2 ต่อบล็อกกระดูกสันหลังเข้ากับถุงใส่ของเหลว

1. ตำแหน่งการไหลของน้ำของบล็อกกระดูกสันหลัง

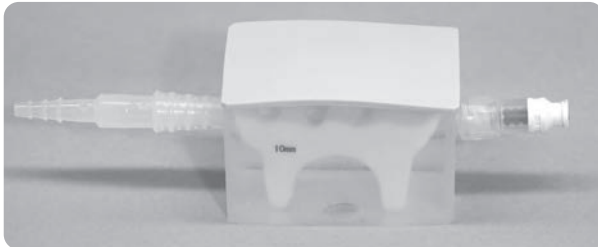



ต่อกับถุงใส่ของเหลว

ต่อกับกระดูกสันหลัง

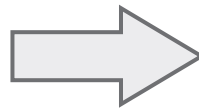


หันส่วนนี้เข้าที่ส่วนหัวของหุ่นฝึก

2. ต่อสายยางของถุงใส่ของเหลวเข้ากับบล็อกกระดูกสันหลังและดันให้แน่น

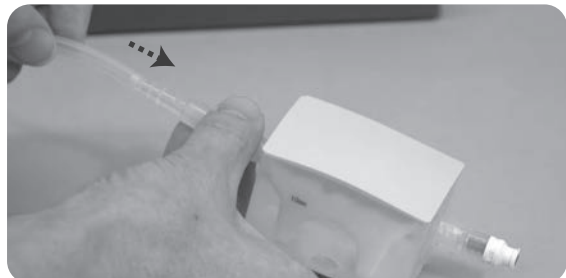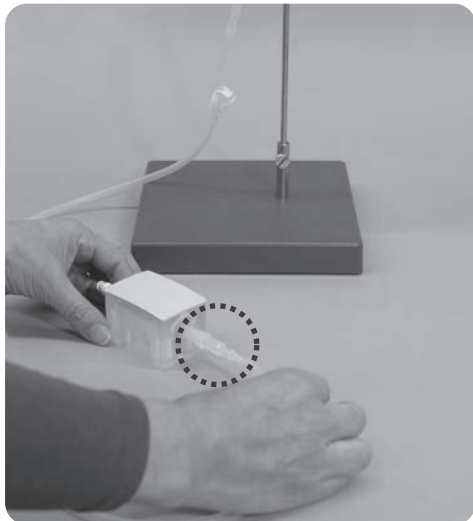

3 ใส่น้ำลงในถุงบรรจุของเหลว

1. ปิดแคลมป์ที่สายยาง

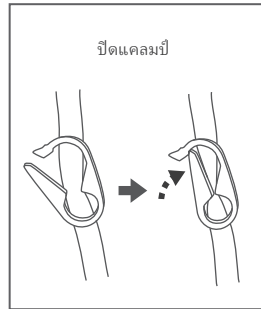


2. เติมน้ำลงในถุงบรรจุของเหลว





4 เติมน้ำลงในใบลือคกระดูกสันหลัง

1. ต่อกะบอกฉีดยาเข้ากับบลือคกระดูกสันหลังและหมุนลือคให้แน่น

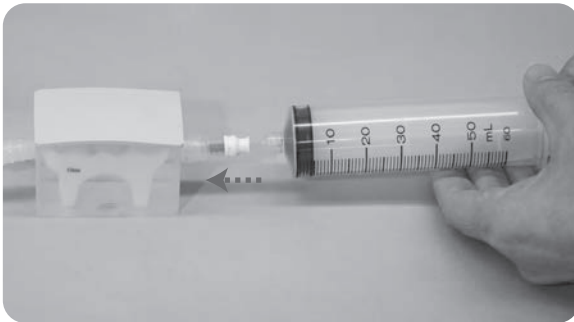


2. เปิดแคลมป์และทำการดูดน้ำให้ไหลผ่านบลือคกระดูกสันหลังเข้ามาในกระบอกฉีดยา

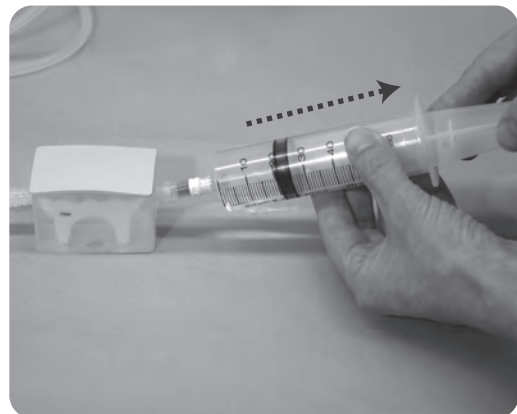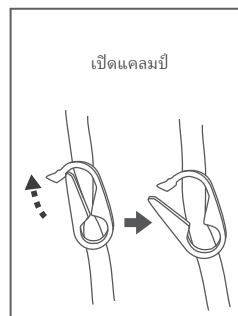


5 ติดตั้งบล็อกเจาะกระดูกสันหลังเข้ากับตัวหุ่น


1. ปิดแคลมป์

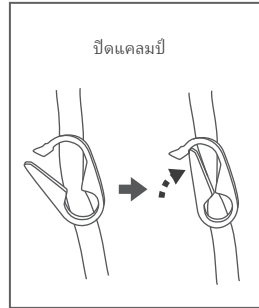

2. ใส่บล็อกเจาะกระดูกสันหลังเข้ากับตัวหุ่น


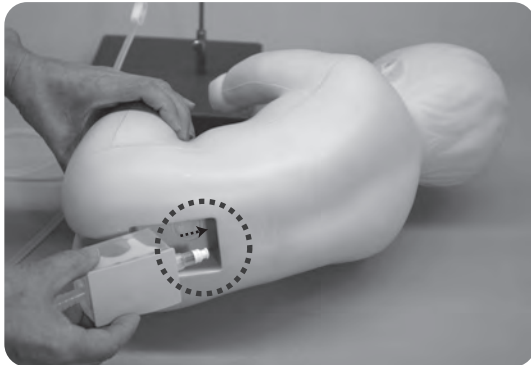


3. เปิดแคลมป์และทำการฝึกเจาะน้ำกระดูกไขสันหลัง

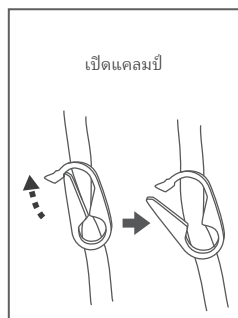

1 หลังจากการใช้งาน

5. ดึงสายยางเชื่อมต่อถุงใส่ของเหลวและกระบอกฉีดยาออกจากตัวบลิတ်กระดุกไขสันหลัง

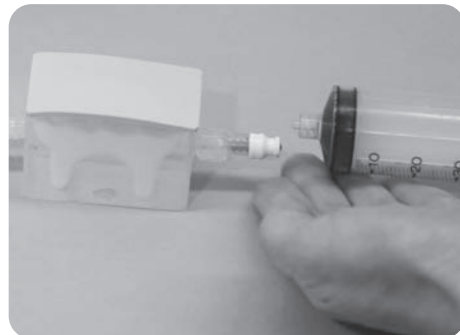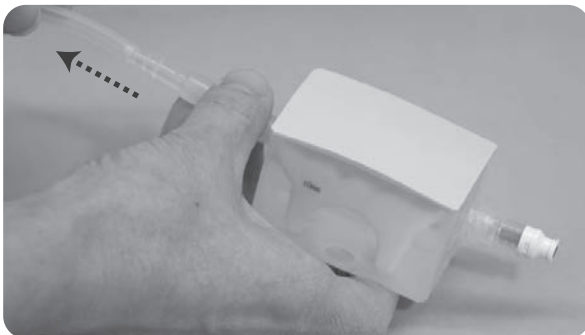

6. ถ่ายน้ำออกจากถุงใส่ของเหลว

