


คู่มือการใช้งาน

ชุดฝึกการผ่าตัดซ่อมเส้นเอ็น

BSS Tendon Repair Trainer (50056)


การถอดชิ้นส่วน Tendon

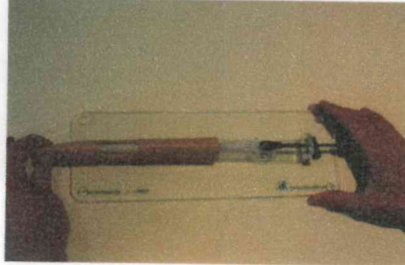

ขั้นตอนที่ 1 : ถอดชิ้นส่วนผิวหนังออก ในขั้นตอนนี้อาจต้องใช้สารหล่อลื่นในการช่วยเหลือ



ขั้นตอนที่ 2 : แกะคลิบที่หนีบส่วนปลายของ Tendon

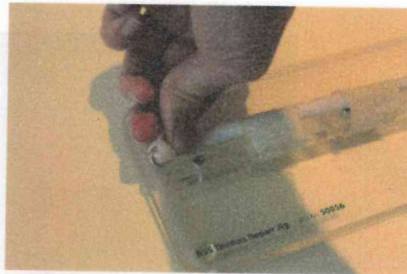


ขั้นตอนที่ 3 : แกะคลิบที่หนีบส่วนปลายของ Tendon อีกข้าง




ขั้นตอนที่ 4 : ค่อยๆ ถอดชิ้นส่วน Tendon ออกตั้งรูป โดยให้ส่วนปลายเป็นตะขอลอดผ่านช่องสี่ขาทั้งสองช่อง


การดึง Tendon

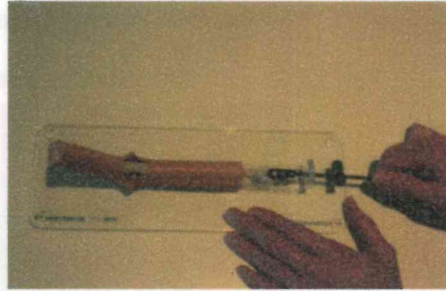

ขั้นตอนที่ 1 : ค่อยๆดึงสาย Tendon belt

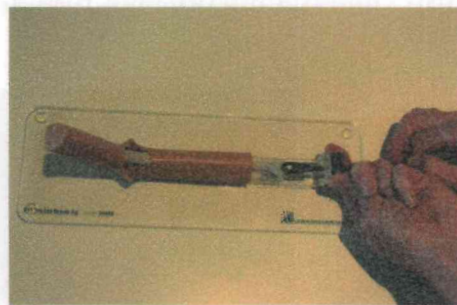

ขั้นตอนที่ 2 : ใช้มือบีบปุ่มที่ตัวยึดเพื่อปรับตำแหน่งเข้าใกล้ไปยังแผ่นพลาสติก
เพื่อยึดสาย Tendon belt ที่ถูกดึงอยู่ให้คงที่

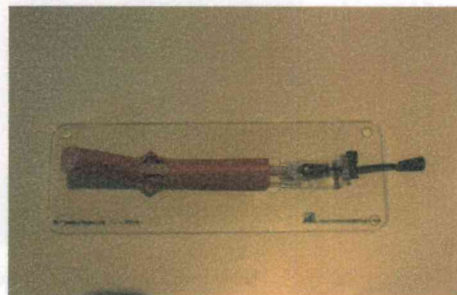

ชิ้นส่วน Tendon ถูกดึงให้อยู่ในระดับในการงอนิ้ว

การดูแลหุ่น

- ควรเก็บหุ่นในกระเป๋าที่ให้มาทุกครั้งหลังการใช้งาน
- ใช้สารหล่อลื่นในปริมาณที่เพียงพอและถูกตำแหน่งทุกครั้งที่ใช้งาน
- ระบายของเหลวทิ้งและปล่อยให้แห้งทุกครั้งหลังใช้งาน ก่อนเก็บ
- ล้างมือให้สะอาดก่อนการใช้หุ่นทุกครั้งเพื่อป้องกันคราบสกปรกที่อาจเป็นอันตรายและไม่สามารถล้างออกได้
- หุ่นสามารถทำความสะอาดโดยใช้น้ำสบู่อ่อนๆ แต่ห้ามนำหุ่นไปแช่น้ำเดือดขาด