


## คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษา


ชื่อหุ่น : M009 หุ่นฝึกการเจาะช่องท้อง (Abdominal Paracentesis)

### วิธีการใช้

1. นำชุดช่องท้อง (ที่มีรอยเว้าของตับ ลำไส้และกระเพาะอาหารด้านล่าง) วางในตัวหุ่นในตำแหน่งที่ต้องการ
2. นำแผ่นผิวหนังหน้าท้อง วางลงบนตัวหุ่นให้ตรงตำแหน่งทั้ง 2 ด้าน (ซ้าย-ขวา) ของตัวหุ่น
3. ติดตั้งระบบน้ำเข้า (สีน้ำเงิน) กับตัวหุ่น เปิดระบบน้ำเพื่อปล่อยน้ำเข้าสู่ช่องท้องจนน้ำไหลออกทางสายน้ำออก ( สีแดง)
4. ปิดปลายสายน้ำออก (สีแดง)
5. เริ่มต้นการใช้งาน
6. หลังการใช้งาน ถอดชุดช่องท้องออกจากตัวหุ่น และระบายน้ำออกจากช่องท้องทุกครั้ง

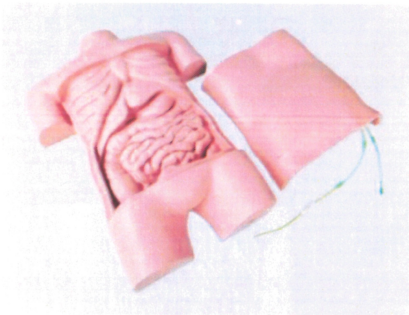

รูปที่ 1

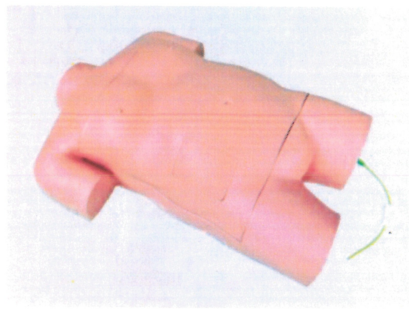

รูปที่ 2

### การดูแลรักษา

1. ก่อนการใช้งาน
  - 1.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
  - 1.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
  - 1.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
  - 1.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น (เฉพาะบริเวณที่เป็นยาง)
2. หลังการใช้งาน
  - 2.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
  - 2.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
  - 2.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
  - 2.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น (เฉพาะบริเวณที่เป็นยาง)
  - 2.5 เก็บใส่ภาชนะบรรจุและปิดฝักให้แน่น
3. ข้อควรระวัง
  - 3.1 ควรหลีกเลี่ยงวัตถุ สิ่งของที่มีความแหลมหรือคมสัมผัสกับตัวหุ่น เพื่อป้องกันการฉีกขาด
  - 3.2 ควรหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหรือเปื้อนของหมึกของปากกาชนิดต่างๆ เพราะจะไม่สามารถเช็ดทำความสะอาดได้
  - 3.3 ห้ามวางวัตถุอื่นกดทับตัวหุ่น เพื่อป้องกันชำรุดและเสื่อมสภาพ
  - 3.4 ควรหลีกเลี่ยงการร่วงหล่นจากที่สูงของหุ่น เพราะอาจทำให้หุ่นชำรุดเสียหายได้