


### SimPad and Linkbox Quick Setup Guide

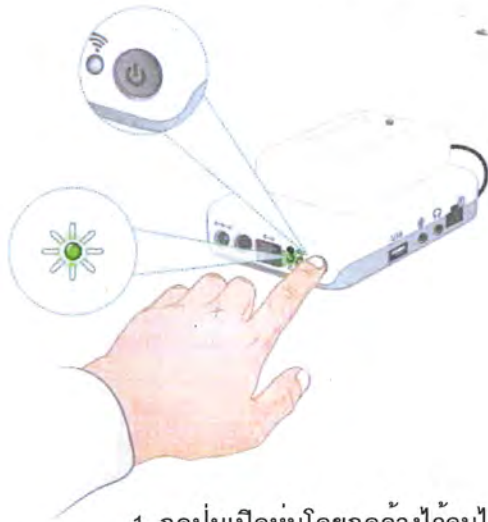

1. กดปุ่มเปิดหุ่นโดยกดค้างไว้จนไฟสีเขียวติดจึงปล่อยมือ



2. เมื่อสัญลักษณ์ไฟเขียวติดค้างที่ตำแหน่ง power หมายถึงหุ่นพร้อมใช้งาน ซึ่งหุ่นจะมีการโอ 1 ครั้ง



3. เมื่อสัญลักษณ์ไฟเขียวติดค้างที่ตำแหน่ง WiFi หมายถึงหุ่นพร้อมเชื่อมต่อกับ SimPad แล้ว



4. กดเปิดเครื่อง SimPad โดยกดปุ่มค้างไว้จนสัญลักษณ์ไฟสีเขียวติด จึงปล่อยมือ




5. เมื่อการเชื่อมต่อระหว่าง SimPad และหุ่นเสร็จสมบูรณ์ สถานะไฟในตำแหน่ง WiFi จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน และหน้าจอ SimPad จะปรากฏสัญลักษณ์หุ่นที่มุมขวามือด้านบนของหน้าจอ

## การปิดเครื่อง




1. กดปุ่มปิดเครื่องค้างไว้จนหน้าจอแสดง  
เมนูการปิดเครื่อง

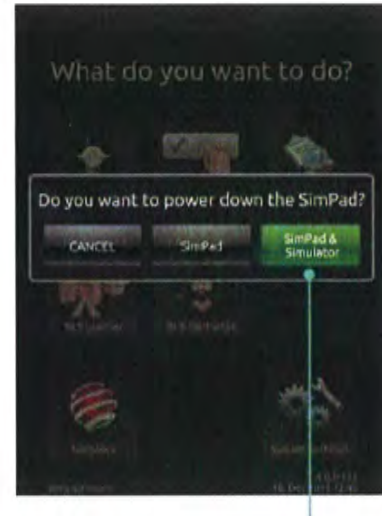

1. เลือก SimPad & Simulator เพื่อทำการ  
ปิดเครื่อง SimPad และปิดหุ่น

หากต้องการปิด SimPad เพียงอย่างเดียว  
ให้เลือกกดที่คำว่า "SimPad"

## การแก้ปัญหาในกรณีเชื่อมต่อหุ้่นไม่ได้

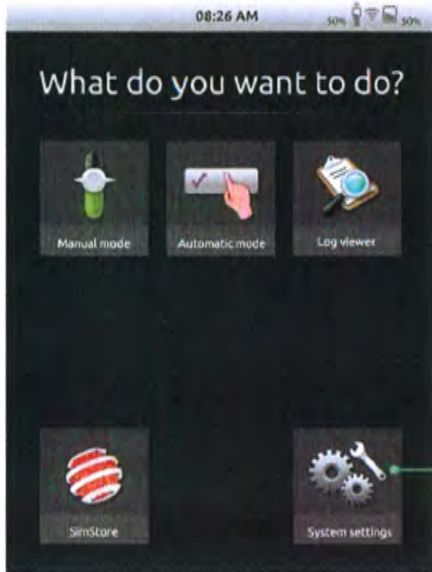

1. ที่หน้าจอหลักเลือกเมนู System Setting  
จากนั้นเลือก Simulator



2. ทำการเลือกหุ้่นที่ต้องการ  
เชื่อมต่อ จนปรากฏสัญลักษณ์  
เครื่องหมายถูกด้านหน้าชื่อหุ้่น  
จากนั้นจึงกด Back เพื่อกลับไป  
หน้าจอเริ่มต้นการใช้งาน

### หมายเหตุ:

1. เมื่อปรากฏสัญลักษณ์  
เครื่องหมายถูกด้านหน้าชื่อหุ้่น มุม  
ขวาบนของจอจะปรากฏ  
สัญลักษณ์หุ้่น และไฟแสดงสถานะ  
WiFi จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
2. ห้ามทำการเลือก **Standardized  
Patient** เนื่องจากเป็นการการใช้  
งานโดยที่ไม่เชื่อมต่อกับหุ้่น

## การเชื่อมต่อหุ้่นผ่านทางสาย LAN



1. ใช้สาย LAN ทั่วไปเชื่อมต่อระหว่าง  
SimPad และตัวหุ้่นโดยต่อผ่านช่อง LAN




2. เมื่อมีการเชื่อมต่อจะมีสัญลักษณ์รูปหุ่น  
ปรากฏที่มุมบนด้านขวาของจอ SimPad

## การเข้าใช้งาน Simpad


### การ Activate ในแต่ละ State



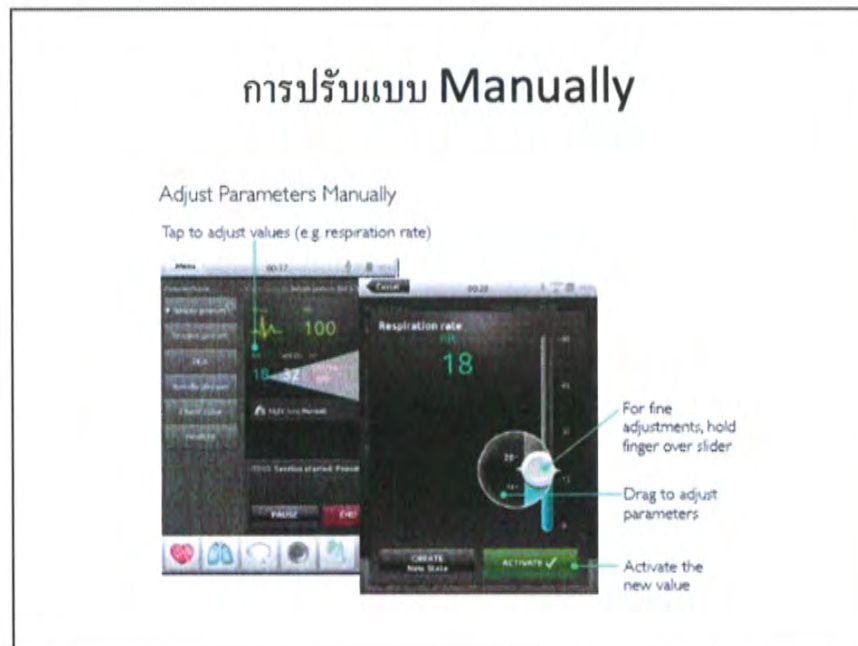

### การปรับแบบ Manually



## View Log

 View log

Go to LogViewer

Resume session


Tap to select new session

Toggle On/Off to view detailed log

Back to home screen

## การปรับ Patient Monitor


Toggle On/Off vital signs




Navigate to menu and select Patient Monitor

Toggle On/Off vital signs

## การเขียน Theme Simpbad

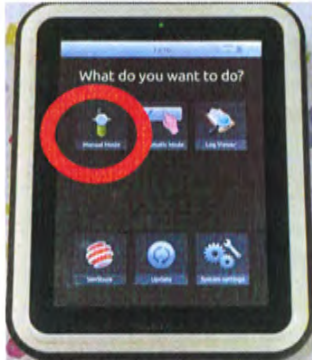

1. เลือกเข้า Manual Mode



2. เลือก Theme Healthy



3. Save Theme เป็นชื่อใหม่ กด Menu




4. กด Save theme as




4. พิมพ์ชื่อ Theme ที่เราต้องการ กด OK




5. กดเลือก Vital Sign หรือ เสียงที่เราต้องการสร้าง state ใหม่

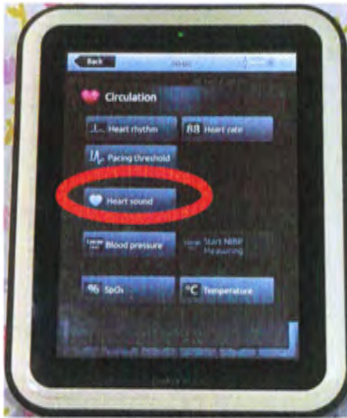


6. หากต้องการเพิ่มเสียง Heart Sound ใน state ใหม่ ให้เลือกเสียงที่ต้องการ

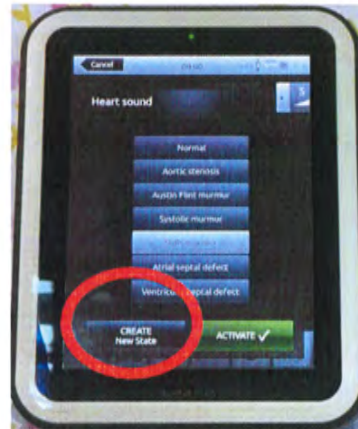

7. เลือกเสียงที่ต้องการ หลังจากนั้นกด Create New State

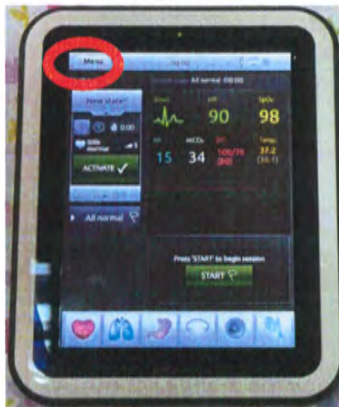


8. Save New State กด Menu

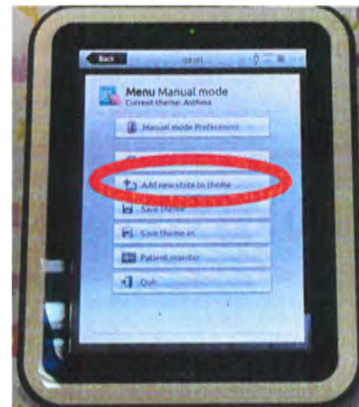

9. เลือก Add New State to Theme




10. พิมพ์ชื่อ State กด OK


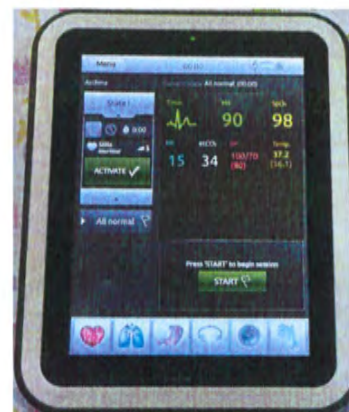


11. Update State ด้วยการกดแถบลูกศรให้ลงมาดังรูป จากนั้นกดที่ Vital Sign ที่ต้องการเพิ่ม แล้วกด Update




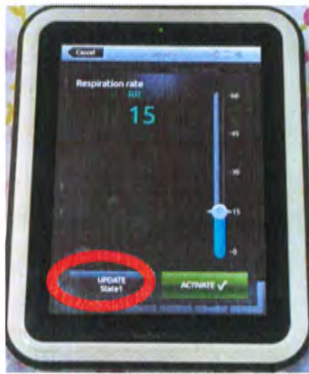

12. กดปรับค่า Vital Sign หลังจากนั้นกด Update (ชื่อ State ที่เราตั้ง)

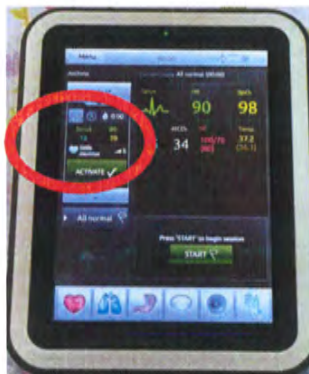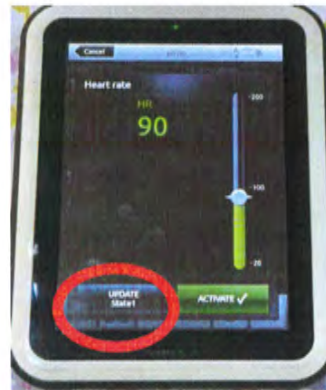

13. เมื่อปรับตั้งค่าทั้งหมดที่ต้องการแล้ว กดเลือก Menu เพื่อทำการ Save

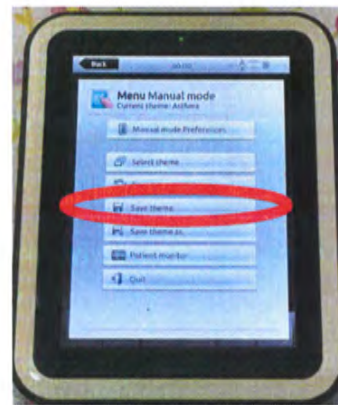

14. กด Save Theme



เมื่อต้องการเพิ่ม State ใหม่ ให้ปิดหน้าต่าง จนเป็นดังภาพจากนั้นทำตามข้อ 5



เมื่อต้องการแก้ไข State เดิม ให้กดเปิดแถบ State ดังกล่าว จนเป็นดังรูป แก้ไขและกด Save Theme ตามข้อ 13 และ 14

## หมายเหตุ

หากมีการเชื่อมต่อกับ Patient Monitor



1. เปิด Router ปุ่มเปิดอยู่ด้านหลังตัวเครื่อง  
รอจนมีไฟสีเขียวและสีส้มขึ้น




2. เปิดหุ่น โดยการเปิด Linkbox

3. กดปุ่มเปิด Patient monitor หลังจากใส่ Password แล้วกดเข้าไปที่โปรแกรม Laerdal แล้ว  
กดที่ Patient monitor หลังจากนั้นกดเชื่อมต่อกับหุ่น Nursing Anne Simulator



Laerdal Simulation Home


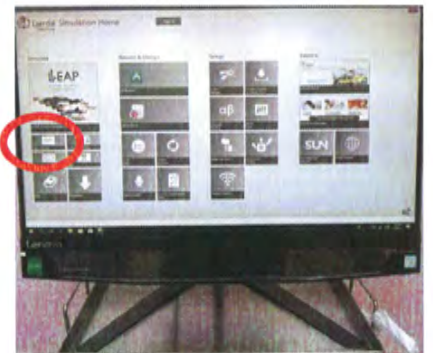


Password : SimUser

4. เปิด Simpad



## SimPad theme editor

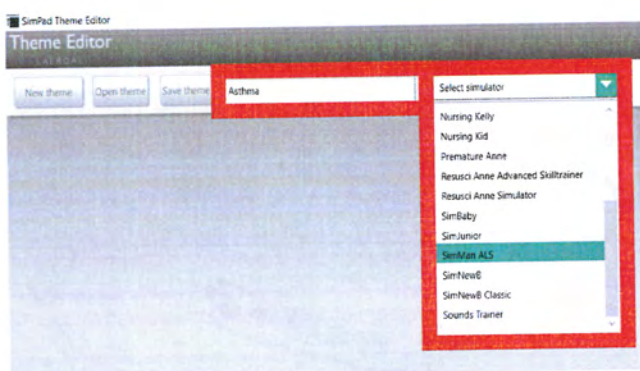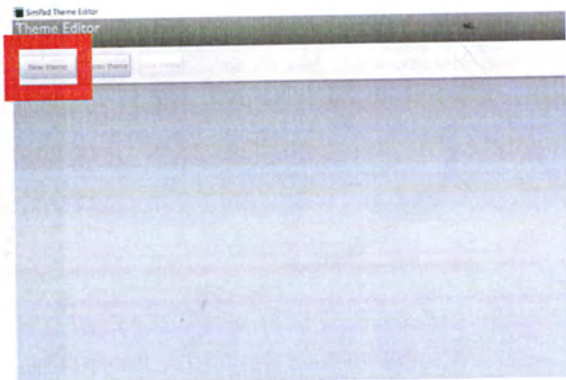

หมายเหตุ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว ให้กด Save และนำไฟล์ไปเปิดที่ SimPad

[https://cdn.laerdal.com/downloads/f6426/SimPadThemeEditorSetup\\_1.3.1.exe](https://cdn.laerdal.com/downloads/f6426/SimPadThemeEditorSetup_1.3.1.exe)