

TH


คู่มือการใช้งาน
Resusci Anne Simulator



www.laerdal.com



อุปกรณ์ประกอบด้วย

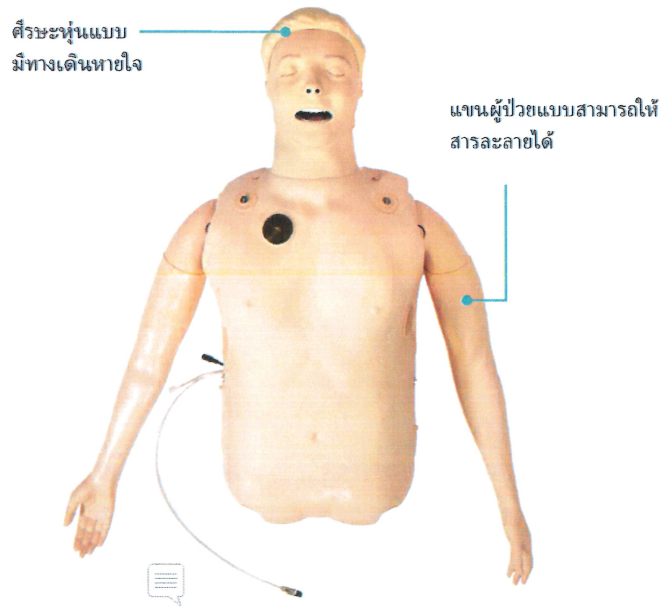

เลือดจำลอง



สเปรย์หล่อลื่น



ม่านตาจำลอง
(ปกติ, แคม, กว้าง)



ปั๊มลม



เครื่องวัดความดันแบบบีบ



ถุงเก็บน้ำ

อุปกรณ์ประกอบด้วย



ขาผู้ป่วย



กางเกงขายาว



กระเป๋าใส่หุ่นแบบเต็มตัว



ชุดหูฟังพร้อมไมค์โครโฟน



อแดปเตอร์หุ่น



สาย USB



สายแลน




สายต่อความยาวสายไมโครโฟน

เริ่มต้นใช้งาน

การชาร์ตแบตเตอรี่



การชาร์ตแบตเตอรี่ให้ใช้สายชาร์ตและอะแดปเตอร์

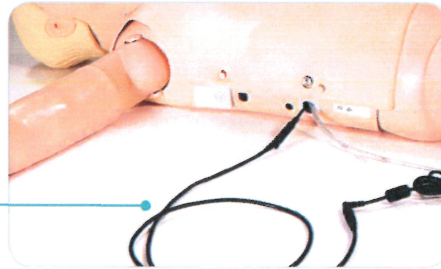

หมายเหตุ


ควรชาร์ตแบตเตอรี่ก่อนใช้งานครั้งแรก

การติดตั้งขา

ถอดแผ่นหนังหน้าอกส่วนล่างและพับขึ้นด้านบน




ถอดส่วนหึ่งออก

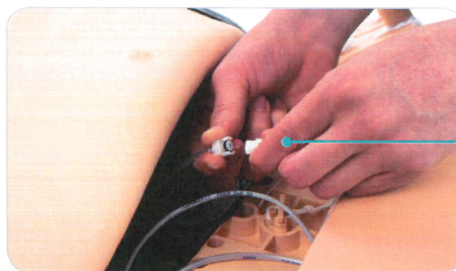


หมุนแปลตอที่ต่อระหว่างอวัยวะเพศและส่วนหึ่ง

ดึงสลักออก

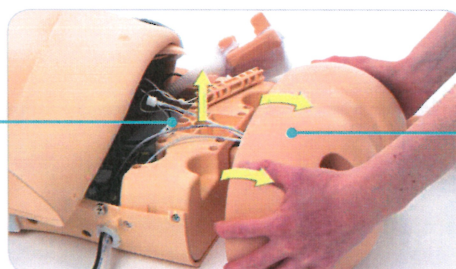


ปลดส่วนอวัยวะเพศออกจากส่วนหึ่ง

เริ่มต้นใช้งาน

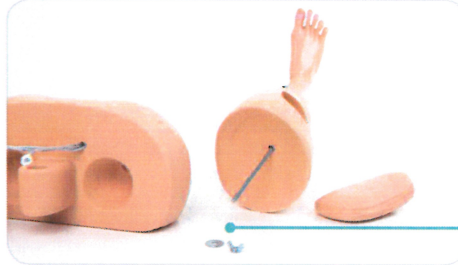


นำน็อตตัวเมียที่ขันนอูขุบ
บริเวณขาส่วนบนออก

นำแผ่นปิดส่วนขาออกและ
สอดขาเข้าช่องโดยให้ปลาย
น็อตโผล่ออกมาและใส่น็อต
ตัวเมียกลับคืน

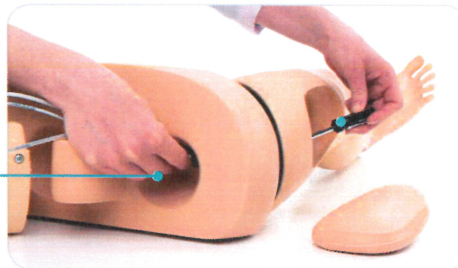


นำส่วนอวัยวะเพศใส่คิ
นส่วนช่องท้อง

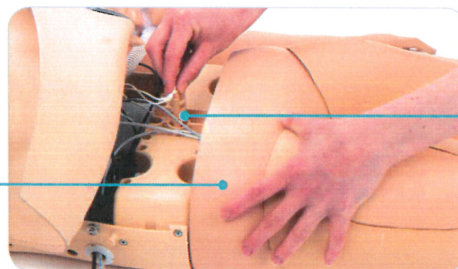

นำสายไฟกลับเข้าสู่ตำแหน่ง
ช่องร้อยสายไฟ


ต่อท่อที่เชื่อมระหว่าง
ส่วนอวัยวะเพศเข้ากับ
ส่วนช่องท้อง

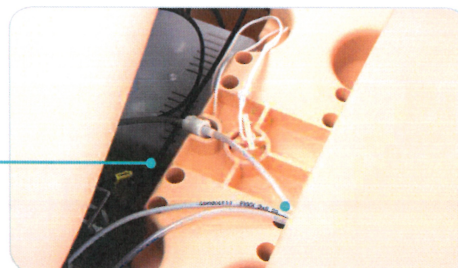

เริ่มต้นใช้งาน

การต่อเครื่องวัดความดันเข้ากับแขน

พันผ้าพันแขนวัด
ความดันเข้ากับ
แขน

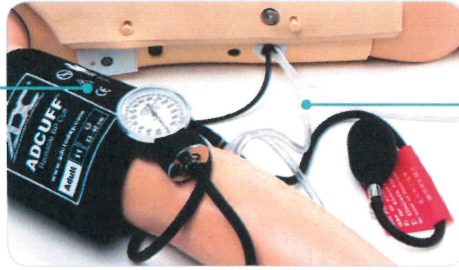


ต่อท่อยางสีใสที่ออกมา
จากผ้าพันแขนเข้ากับ
ปลายอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่
ออกมาจากตัวหุ่น

การสูบลม

ต่อท่อสูบลมเข้ากับวาล์วเติม
ลมบริเวณข้างลำตัวผู้ป่วย

ช่องเก็บลมจะอยู่บริเวณส่วน
ของอวัยวะเพศ

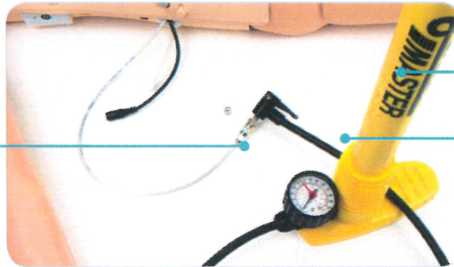


ใช้ที่สูบลมสูบลมเข้าตัวหุ่น
โดยให้มีแรงดันลมไม่เกิน 145
ปอนด์ต่อนิ้ว

จากนั้นปลดท่อสูบลมออก

เริ่มต้นใช้งาน

เปิด/ปิด

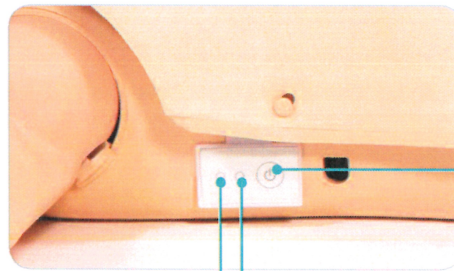

ปั๊ม เปิด/ปิด


ไฟเขียวกระพริบ
= หุ่นเริ่มต้นการใช้งาน



ไฟเขียวติดนิ่ง
= หุ่นพร้อมเชื่อมต่อกับ SimPad



ไฟเขียวติดนิ่ง
= หุ่นพร้อมใช้งาน

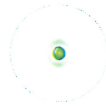


ไฟน้ำเงินติดนิ่ง
= SimPad เชื่อมต่อกับหุ่นแล้ว



การเปลี่ยนม่านตา

ดึงแถบด้านหลัง
ปลดหนังหน้าออกและพับไป
ปัดด้านหน้า

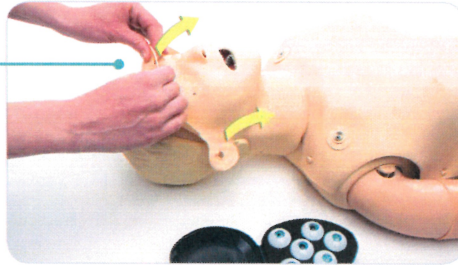

ดึงม่านตาออก
และนำม่านตาใหม่ใส่และ
กดให้แน่น

